



VARSEBOX

VBP

Färdigkonfigurerad.

Klar att koppla in.



Automatisk provisionering



Uppdateras på distans



NIS2-säkrad



Kompatibel med ledande varseblivning



CE-märkt medicinteknisk produkt · MDR 2017/745/EU,
Klass I



Varseblivning som fungerar när det gäller.

Vad är VARSEBOX VBP?

VARSEBOX VBP tar emot inkommande samtal via SIP och omvandlar dem till en analog ringsignal som aktiverar varseblivningssystemet. Enheten konfigureras och uppdateras automatiskt på distans av Lidol AB — ingen manuell konfiguration behövs.

- Klar att använda direkt vid inkoppling
- Konfigureras och uppdateras på distans
- Patienten kan ej ändra inställningar
- Säkrad i enlighet med NIS2

Kompatibla varseblivningssystem



Bellman & Symfon



Signolux



Silent Alert




Transistor-Lynx

CE-märkt medicinteknisk produkt

MDR 2017/745/EU · Klass I · Regel 13, Bilaga VIII
EUDAMED & Nationella Hjälpmedelstjänsten · Lidol AB, SRN: SE-MF-000014318

Inkoppling

VARSEBOX levereras komplett med nätverkskabel och nätaggregat. Anslut enligt bild nedan:

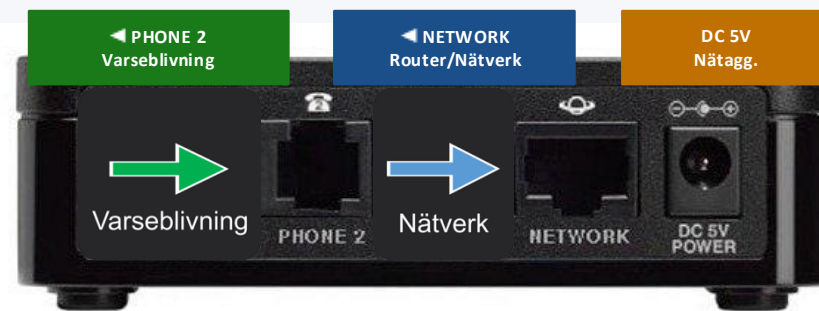

PHONE 2

– RJ11 till varseblivningens telefonsändare

NETWORK

– nätverkskabel till router/brandvägg

DC 5V POWER

– medföljande nätadapter

PHONE 1 och RESET

– *dolda, används ej*

Viktigt:

- Anslut alltid via router/brandvägg
- Uppringande part måste skicka ljud (G.711 A)
- RESET-knappen är övertäckt — kontakta Lidol vid behov
- Använd T-Meeting mobilapp som backup